



iP tester

INTELLIGENT TESTER FOR INFUSION PUMP

仕様

| | |
|-----------------------|---|
| 販売名 | I P テスター |
| 型式 | TT-IPT-01 |
| 一般的名称 | 医薬品注入器検査装置 |
| 医療機器の種類 | 一般医療機器 |
| 医療機器届出番号 | 22B3X10008377607 |
| 電撃保護の形式 | 内部電源機器 |
| 水の浸入保護の程度 | I P X 0 |
| 精度 (チューブの精度を含まない機械精度) | 流量測定: $\pm 0.5\%$ 以内 閉塞検出圧測定: $\pm 3\%$ 以内 |
| 測定範囲 | 流量測定: 25~300ml/h (1ml/h ステップ) 閉塞検出圧測定: 15~150kpa (1kpa ステップ) |
| 電源 | 内蔵バッテリー (充電式 Li-ion 電池) 連続使用時間 約 8 時間 充電: 5VDC 1000mA (USB 充電) |
| 特殊機能 | 測定データ保存: 測定日時・測定値 (流量精度値・閉塞検出圧値) データ保存件数: 1000 件 PCへのデータ転送 (USB ケーブル使用) |
| 警報 | バッテリー電圧低下・測定エラー・メモリーフル・システムエラー (機器内部不具合) |
| 使用条件 | 周囲温度: 20~30℃ 相対湿度: 20~90% |
| 保管条件 | 周囲温度: -20~45℃ 相対湿度: 10~95% (ただし結露なきこと) |
| 本体寸法 | (長さ) 415 mm × (幅) 90 mm × (高さ) 90 mm |
| 質量 | 約1500 g |

シリンジポンプ点検の新方式



製造販売業者
株式会社トライテック 安心・安全のカタチを目指して。
〒419-0204 静岡県富士市入山瀬 616-1 TEL 0545-71-6755 FAX 0545-72-2950



<http://tri-tech.co.jp>

tri-tech

iP tester

INTELLIGENT TESTER FOR INFUSION PUMP

新思考
輸液ポンプテスター



今すぐやりたくなる 新しい輸液ポンプ点検

iP tester

IP テスターは、**輸液ポンプ点検を高速・簡便化する**画期的な測定機器です。
本機器を輸液ポンプにセットするだけで即座に**流量精度測定・閉塞検出圧測定**の点検を開始し、特別な操作をすることなく測定結果が得られます。



※点滴プローブのある輸液ポンプにも対応

ワンプッシュで 計測開始!

本機器にチューブを取り付け、
輸液ポンプの開始キーを押すだけで
すぐに測定を開始します。

開始

終了

スムーズに繰り返し計測!

測定が終わると、自動で輸液バッグに水が戻ります。
輸液ポンプのドアを開け、次のポンプに付け替える
だけで続けて測定できます。


次のポンプを
セット

合否判定も 機械まかせにしてOK!

本機器は測定・合否判定まですべて自動で行います。
約3分45秒(流量:120ml/hの時)で測定が終了し、
合否判定が表示されます。



測定中表示

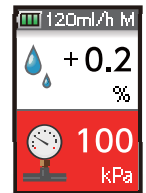

測定結果表示

(流量精度)

(閉塞検出圧)

点検にかかる手間・時間を大幅に削減!

輸液ポンプ点検にかかる面倒な
準備や後片付けは一切不要です。



段取り
後片付け
不要

台数の多い現場でもラクラク点検!
大幅な時間短縮に!



時間
短縮

小回りのさくIP テスターなら、
持ち出しのできない場所にある輸液ポンプに
出張点検を行うことができます。



出張
点検